



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

HU – FUNKCIÓ:

Ezeket a gyakorló tojásokat a hüvelyi izmok edzésére lehet használni.

A hüvelyi izomzat azonnal dolgozni kezd a tojás behelyezése után.

Használat közben széles körű tevékenységet végezhet: séta, futás, úszás, kerékpározás stb.

Rendszeres használat után megerősödik a hüvelyfal és a medencefenék izomzata, ami intenzívebb intim élményekhez vezet.

Egyszerűsített használati útmutató:

Ha még nincs tapasztalata ilyen vagy más tojások/golyók használatával, javasoljuk, hogy egy tojással kezdje.

Egyszerűen helyezzen be egy vagy két tojást a hüvelybe.

A tojást/tojásokat addig nyomja be, amíg nem okoz kényelmetlenséget.

Behelyezéshez vízbázisú síkosító gél használata javasolt.

NEM AJÁNLOTT A VÉGBÉL IZGATÁSÁRA.

Figyelem

IW8043, IW8044, IW8045, IW8046, IW8047, IW8048, IW8049, IW8050, IW8051, IW8052, IW8053, IW8054

Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély, lenyelés vagy belélegzés esetén. A csomagolás és a rögzítőelemek nem részei a masszírozó készüléknek. Első használat előtt ezeket távolítsa el. A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

Kérjük, tartsa be a következőket:

1) A Ni-Cd akkumulátorok nem megfelelő kezelése túlmelegedést, tüzet, robbanást, sérülést vagy a cellák szivárgását okozhatja.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat!

2) Az akkumulátorokat tartsa távol víztől és száraz helyen.

3) Használat után húzza ki a töltőt az elektromos hálózatról (USB-portból).

4) A masszírozót csak megfelelő és biztonságos helyen használja.

5) Ne használja álló vízben vagy esőben. A nedvesség károsíthatja a készüléket.

6) Használat befejezése után kapcsolja ki a készüléket és a vezérlőt, vegye ki az elemeket.

7) Az akkumulátort első használat előtt tölts fel teljesen (újratölthető akkumulátor használata esetén).

8) Használat befejezése után válassza le az akkumulátort.

9) A műszaki adatok, tulajdonságok, szín és tartalom eltérhetnek a csomagolástól.

Biztonsági utasítások

- Az elemek cseréjét felnőtt végezze
- Ne keverje az új és régi elemeket
- Ne keverje a különböző típusú elemeket (alkáli, újratölthető, Ni-Cd stb.)
- Az egyszer használatos elemeket nem szabad újratölteni
- Az újratölthető elemeket töltéshez vegye ki a készülékből
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt jelenlétében szabad tölteni
- Különböző típusú és új/használt elemeket ne használjon együtt
- Csak azonos vagy hasonló típusú elemeket használjon (a gyártó ajánlása szerint)
- Ügyeljen a helyes polarításra
- A lemerült elemeket távolítsa el a készülékből. Kerülje a rövidzárlatot
- Ne dobja az elemeket tűzbe! Robbanás vagy szivárgás veszélye
- Hosszabb használaton kívül távolítsa el az elemeket
- A használt elemeket környezetbarát módon semmisítse meg
- Ezeket az információkat őrizze meg a jövőben
- Az elemek nem tartozéka a vezérlőnek vagy a készüléknek
- A készüléket biztonságos helyen tölts
- Higiéniai okokból és egészségmegőrzés miatt ne adja át a készüléket másnak
- Használat után azonnal mossa le a készüléket
- A készülék vízálló
- Csak vízbázisú síkosítóval használja
- Masszázsolaj, testápoló, krém vagy étolaj használata tilos! Ezek károsíthatják a készüléket
- Ha használat közben kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot. Ne használja, ha a felülete nem sima vagy éles széle van
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja

A forgalmazó meggyőződése, hogy az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) szerint, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem élhet az elállási jogával olyan áruk esetében, amelyeket azok jellege miatt nem lehet visszaszolgáltatni, minden gyorsan romlandó, illetve higiéniai okokból vissza nem szolgáltatatható árut – ideértve minden erotikus segédeszközt, fehérneműt és kozmetikumot, ha az nincs eredeti csomagolásban – nem lehet visszaváltani a közegészségügyi és higiéniai követelmények miatt.

Egyszerűsítve:

- 1) Az INTIMWELLNESS termékekre a megszokott 2 éves jótállást biztosítjuk a termék működésére, ahogy kínálatunk többi termékére is.
- 2) Higiéniai és ésszerű okokból a kibontott INTIMWELLNESS termékekre nem érvényes a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, ellentétben kínálatunk más termékeivel.